

TSK骨髄穿刺針/TSK骨髄移植針

成人用／小児用



仕様

TSK骨髄穿刺針(ショートタイプ:胸骨用、ロングタイプ:腸骨用)

単回使用 医療機器認証番号:220AGBZX00232000 クラス:II 管理医療機器

製品名	製品コード	サイズ	包装形態	定価
TSK骨髄穿刺針	SIL-141	14G ショート(5~20mm)	1箱10本入り EOG滅菌済み	1,350円/本
	SIL-142	14G ロング(20~35mm)		
	SIL-151	15G ショート(5~20mm)		
	SIL-152	15G ロング(20~35mm)		
	SIL-161	16G ショート(5~20mm)		
	SIL-162	16G ロング(20~35mm)		
小児用	SIL-181	18G ショート(5~20mm)		1,550円/本

調整ホルダーを取り外すと有効長はそれぞれ25mm、40mmになります。

TSK骨髄移植針

単回使用 医療機器認証番号:220AGBZX00232A01 クラス:II 管理医療機器

製品名	製品コード	サイズ	包装形態	定価
TSK骨髄移植針	SIL-14070	14GX 70mm	1箱10本入り EOG滅菌済み	1,200円/本
	SIL-14100	14GX 100mm		



TSK骨髄穿刺針/TSK骨髄移植針

TSK骨髄穿刺針

■特長

負担軽減	ディスプレイ針ならではの確かな切れ味で容易に穿刺が行えます。 また、株式会社タスクは国内メーカーならではの、安価で高品質な製品提供をさせて頂いております。
完全ディスプレイ	完全ディスプレイの骨髄穿刺(マルク)針。 完全ディスプレイ製品で、刃先の研磨や再滅菌の必要がありません。
豊富なサイズ	14G~18Gまでの豊富なサイズをご用意。 ショートタイプは胸骨へ、ロングタイプは腸骨にご使用下さい。
安心設計	全サイズ調整ホルダー付の安心設計。 確実に吸引を行うために、シリンジ装着口はルアーロックタイプを採用。

■使用方法 (骨髄穿刺 腸骨の場合)



[1]
穿刺予定部位を消毒し、穿刺部の皮下と骨膜に局所麻酔をおこなう。



[2]
母指球と示指球でTSK骨髄穿刺針をしっかりと固定保持する。調整ホルダーを回し、針の長さを調整した後、穿刺部位皮膚も反対の手で穿刺中に位置がずれないようにしっかりと固定する。



[3]
穿刺針で皮膚を穿刺し、骨膜に刃先が当たっていることを確認する。針が骨膜に達したらキリで穴をあけるような要領で垂直に針を進め、骨(緻密質)から骨髓腔まで到達させる。



[4]
内針をまっすぐ抜く。
注意 引き抜きの際、内針のツマミ(ピンク部分)を回さずまっすぐに引き抜いて下さい。



[5]
ディスプレイシリンジ(注射器)を接続する。



[6]
ディスプレイシリンジ(注射器)の内筒を引き、陰圧をかけて骨髓液を吸引する。



[7]
TSK骨髄穿刺針を抜き取り素早く止血する。



[8]
穿刺部を消毒し、ガーゼを当て圧迫固定する。

製品お問い合わせは…

LEADERSHIP THROUGH IMAGINATION

TSK TSK LABORATORY, JAPAN

製造販売 **株式会社 タスク**

〒328-0002 栃木県栃木市惣社町1485-11

TEL 0282-27-8426 FAX 0282-27-1943

ホームページ:www.tsklab.co.jp E-mail:tsk@tsklab.co.jp

Distributed by

2009.03.01

TSK-血-001