

医療機関の皆様へ

2021年 5月  
株式会社タスク  
栃木県栃木市惣社町 1485-11  
TEL 0282-27-8426

## TSK ステリジェクト LDS ご使用上のお願い (新型コロナワクチン接種用)

- 記 -

### 1. 製品情報

器 74 医薬品注入器

単回使用注射用針 (JMDN コード : 30889000)

TSK ステリジェクト LDS (品目コード : LDS-25025T)



### 2. 報告された事象

新型コロナワクチン接種用注射針として、ご使用いただいております本製品にて、「針が曲がったものが届いた」というお問合せを、複数施設よりいただいております。針の曲がったものは、右の画像を報告いただいております。



### 3. 医療機関様へのお願い


原因については調査中ですが、使用方法による事象であることも想定されるため、使用される際には、裏面 (CN21003-3) の「使用方法及び注意のお願い」をご確認いただきますようお願い致します。

※ 操作方法については弊社制作の動画も閲覧できます。(右の QR コード)




## 【使用方法及び注意のお願い】

- 1) 注射針の針基(ハブ)とシリンジ(筒先)を確実に嵌合させる。

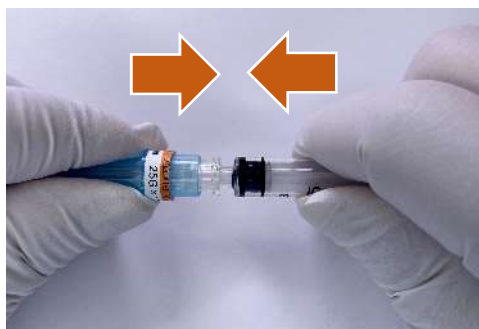


- 2) ケースを真っすぐに、針先とケースが接触しないように引き抜く。

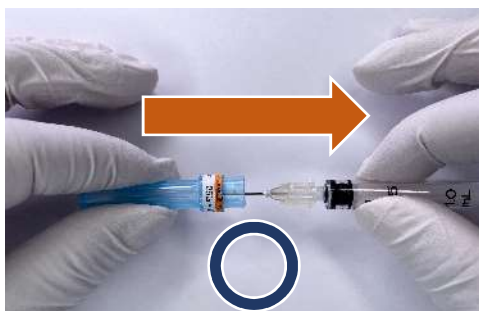

### 【針の曲がりが発生する可能性のある操作】

ケースとシリンジを山折りに曲げ、ケースを斜めに引き抜くと、針が曲がることがあります。  
このような操作は行わないで下さい。

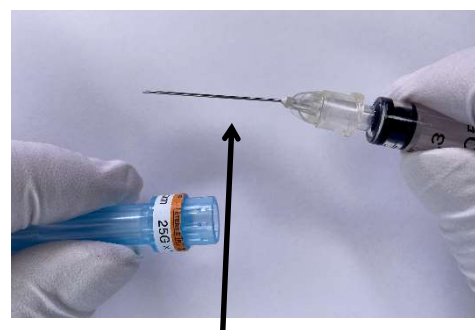

「針の曲がり」が発生

### ⚠ 注意

ケースとシリンジを山折りに曲げるようにして  
ケースを外さないで下さい、  
「針が曲がる」ことがあります。  
ケースを真っすぐ引くことに留意して下さい。

以上