

特長

※針は別売りとなります。



定量注入

1 mL / 25 クリック
0.04 mL / 1 クリック

ローデッドタイプ

筒先の残留注射用医薬品を最小化

ルアーロックタイプ

注入時の針はずれリスクを軽減

単回使用

TSK SmartClick™

TSKスマートクリック™



製品規格

容量	品番	入数
1mL	QSY-00010	10本/箱

販売名: TSKスマートクリック
製造販売届出番号: 09B2X00008000007
単回使用 クラスI 一般医療機器
EOG滅菌

TSK SmartClick™

TSKスマートクリック™

TSKスマートクリックは、注射針を用いて正確に定量した注射用医薬品を注入する器具です。

ガスケット

外筒

フランジ

押し子





使用方法

1 包装を開封し、注射針と確実に接続します。

2  押し子のマークが [FREE] の方向にあることを確認します。

※イメージ

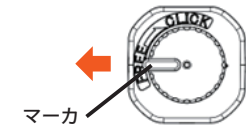

3  押し子を引いて注射用医薬品を吸引する。このとき押し子のマークが [FREE] の方向にある状態のまま動作を行ってください。

POINT

押し子は止まる位置まで引ききってください。途中で次動作を行うと破損の原因になります。


4  押し子が止まる位置まで押し子を引いたら、押し子のマークを [CLICK] の方向に合わせます。

※イメージ



5  ガスケットの目盛合わせ位置(ファーストライン)を1mLに合わせます。

目盛合わせ位置(ファーストライン)

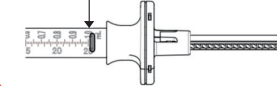

POINT

この動作の際にシリンジ内のエア抜きを行います。1mL位置に合わせた後に押し子を回転させない。(破損の原因になります。)

6 押し子をさらに押し込み注射用医薬品を注入します。
注入量:1クリック0.04mL/総クリック数:25回

※ご使用前に最新の電子添文をご確認ください。